

UPUTE ZA NEPRIHVAĆANJE UZORAKA

Priprema bolesnika i uzimanje uzoraka biološkog materijala

- bolesnik mora biti pravilno pripremljen za uzimanje uzorka (prema općim uputama koje se nalaze u priručniku o kvaliteti)

Pribor za uzimanje uzoraka

- uzorak krvi uzima se u odgovarajuće epruvete ovisno o traženim pretragama, pri čemu se strogo pazi na količinu uzete krvi (do označene razine)

Prijem uzoraka

- svaki uzorak dopremljen u laboratorij ili uzet u laboratoriju mora biti pravilno označen te uzorak mora imati i odgovarajuću (jednako označenu), čitko i pravilno ispisanu uputnicu s točnim vremenom uzimanja uzorka
- **ne prihvaćaju se zgrušani uzorci krvi uzeti u epruvete s antikoagulansom,**
- **epruvete bez antikoagulansa moraju biti dostavljene u laboratorij u odgovarajućem položaju (krv nije u dodiru s čepom) i ne smiju se miješati (hemoliza)**
- **uzorci mokraće ne smiju se prenositi u epruvetama s gelom**
- **ne prihvaćaju se uzorci za koje je prošlo dozvoljeno vrijeme od uzimanja do dostave u laboratorij**
- **hemolitični uzorci (hemoliza *in vitro*)**
- **lipemični uzorci**

Napomene uz utjecaj hemolize: ako se sumnja na hemolizu *in vivo*, savjetuje se s liječnikom radi dobivanja kliničkih informacija, a laboratorijski nalazi se izdaju uz napomenu.